



Univox® AutoLoop



Rumslinga



Soffslinga



Slingkudde

Innehåll

Introduktion.....	3
Översikt.....	3
Koppling till platt-TV.....	4
Koppla till andra ljudkällor.....	4
Koppla slingan.....	4
Koppla slingtråd.....	4
Koppla slingkudde eller soffslinga.....	5
El-anslutning.....	5
Inställningar.....	5
Underhåll och skötsel.....	5
Säkerhetsföreskrifter/garanti.....	5
Felsökning.....	6
Service.....	6
Teknisk information.....	6
Miljö och återvinning.....	6
Tillbehör.....	7

Introduktion

Tack för att du har valt en Univox®-produkt. V hoppas att du kommer att känna dig nöjd med den.

Univox AutoLoop är en helautomatisk slingförstärkare för trådlöst lyssnande via din hörapparat. Anslut din TV, Stereo, MP3, mikrofon eller annan ljudkälla till AutoLoop:s 3,5mm kontakt.


Förpackningen innehåller en slingförstärkare med nätadapter, samt den slinglösning som du har valt, se bilderna på framsidan. Andra tillbehör till denna produkt finns listade i avsnittet Tillbehör.

Vänligen läs denna bruksanvisning innan du installerar produkten. Samtliga Univox® slingförstärkare har hög slingströmkapacitet vilket gör produkten kraftfull och tillförlitlig till att uppfylla den internationella standarden för slinganläggningar, IEC 60118-4.

Översikt



Indikator för ljudaktivitet på slingan är placerad under förstärkaren, framtill.

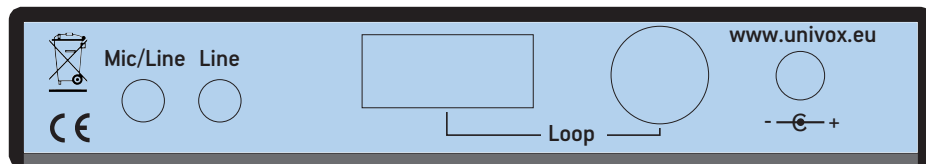

Ljudkälla 3,5mm ingångar

Rumslinga

Slingkudde/
soffslinga

Nätadapter

Koppling till platt-TV

När förstärkaren kopplas till en platt-TV, kan en lätt fördröjning uppstå mellan ljudet i TV:ns högtalare och ljudsignalen från TV:ns ljudutgång. För att undvika den ekoeffekt som kan uppstå, kan du behöva fördröja ljudet i slingförstärkaren för att matcha ljudet som spelas i TV:ns högtalare. Detta kan göras genom att använda en Univox® TV Sync. Koppla TV:n till TV Sync 3,5mm ingång eller dess SCART-kontakt. Koppla sedan TV Sync 3,5mm kontakt till AutoLoop 3,5mm ingång.

Koppla till andra ljudkällor

Koppla ljudkällan till någon av de två 3,5mm ingångarna på förstärkarens baksida.

- Använd primärt den vänstra ingången markerad "Mic/Line" för mikrofoner.
- Övriga ljudkällor kopplas primärt till den högra ingången märkt "Line".
- Om du har två mikrofoner eller två andra ljudkällor kopplas den andra ljudkällan till den lediga ingången.

Notera

Om du är osäker eller missnöjd med ljudkvaliteten, prova att koppla din ljudkälla till den andra ingången vilket kan förbättra resultatet för ljudet från din ljudkälla. Utrustningen tar inte skada av att du gör så. Använd en adapter om din ljudkälla saknar en 3,5mm kontakt.

Koppla slingan


Koppla slingtråd

Rulla ut slingtråden (0,75 mm²) runt användningsområdet. Fäst tråden vid golvnivå eller taknivå (ca 2,4m). Slingtrådsrullen innehåller 50 st kabelclips för att fästa tråden. Annan fästareordning kan användas. Koppla kabelns ändar till förstärkarens slingterminal, vilken är den vänstra kopplingen på förstärkarens baksida märkt "Loop".

Koppla slingkudde eller soffslinga

Placera slingkudden på den plats där användaren vill sitta – på eller under stol-/soffdynan. Soffslingan placeras runt soffan på golvet, exempelvis under en matta. Placera kabeln så att ingen snubblar eller trasslar in sig i den. Anslut slingkuddens/soffslingans DIN-koppling till förstärkarens DIN-kontakt, vilken är den högra kopplingen på förstärkarens baksida märkt "Loop".

El-anlutning

Anslut sladden till den kontakt på förstärkarens baksida markerad  +. Koppla sedan nätadaptern till eluttaget.

Inställningar

Univox® AutoLoop helt automatisk, inga inställningar krävs.

Underhåll och skötsel

Hantera produkten med varsamhet för att förlänga livstiden.

Montera inte produkten där den utsätts för regn, vatten eller fuktiga omgivningar samt starkt solljus/värme.

Säkerhetsföreskrifter/garanti

Observera att produktgarantin ej omfattar fel som uppstått genom ingrepp i produkten, ovarsamhet, felaktig inkoppling/montering eller underhåll.

Felsökning

Om slingförstärkaren inte fungerar tillfredställande, kontrollera följande:

- Försäkra dig om att din hörapparat är satt i T-position.
- Kontrollera att nätadaptern är ordentligt kopplad till eluttaget samt till förstärkaren.
- Lyser aktivitetsindikatorn? Om inte, kontrollera att en signalkälla är kopplad till förstärkaren samt att en ljudsignal spelas. Fortsätt till avsnittet Service om aktivitetsindikatorn fortfarande inte lyser.
- Om aktivitetsindikatorn lyser och du fortfarande inte hör något i hörapparaten, fungerar inte slingkudden/soffslingan/rumslingan. Kontrollera anslutningen. Om detta inte avhjälper felet är det förmodligen ett brott på slingkudden/soffslingan/rumslingan. Följ instruktionerna i avsnittet Service.

Service

Om slingförstärkaren trots ovanstående felsökning inte fungerar bör du lämna den till försäljningsstället eller sända den till Bo Edin AB enligt nedanstående adress. Märk godset med ditt namn, adress och telefonnummer samt bifoga kvitto eller faktura och felbeskrivning.

Teknisk information

För kompletterande upplysningar hänvisar vi till datablad/broschyr och CE-certifikat som kan laddas ner från "Dokumentarkiv" på www.edin.se.

Vid behov av ytterligare teknisk information, kontakta försäljningsstället eller Bo Edin AB på support@edin.se.

Miljö och återvinning

Släng förbrukad produkt/batterier enligt gällande miljöföreskrifter.

Bo Edin AB är anslutna till REPA och El-kretsen.

Om du följer ovanstående önskemål om återvinning medverkar du till en bättre miljö.



Tillbehör

Art nr Beskrivning

283002	Slingkudde 400x400x5mm, 10m kabel
283220	Soffslinga, 8m slinga, 10m kabel
283240	Rumslinga, 30m rulle, inkl. 50 clips
283210	Förlängningssladd, 10m till slingkudde/soffslinga
203060	TV Sync, ljudsynkronisering för platt TV
281015	Ljudkabel, 3,5mm hane till 2xRCA, 1,5m kabel
282009	Dubbelanslutning, 3,5mm kontakt till 2xRCA anslutning
242401	Högtalarmikrofon 13A, kardborrfäste, 3,5mm koppling, 1,8m kabel
241205	Handhållen mikrofon JTS NX-9, XLR kontakt, kabel ingår inte
281016	Mikrofonkabel till JTS NX-9, XLR anslutning till 3,5mm kontakt, 2,5m kabel
581050	Myggmikrofon, 3,5mm kontakt, 1,1m kabel
241501	Konferensmikrofon 13T, 3,5mm kontakt, 3m kabel
241601	Svanhalsmikrofon M-1, 3,5mm kontakt, 1,5m kabel

Univox[®] AutoLoop

Part No Description

201510P	Univox [®] AutoLoop EU med slingkudde
201510R	Univox [®] AutoLoop EU med rumslinga
201510S	Univox [®] AutoLoop EU med soffslinga

Återförsäljare

Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter. 1969 lanserade vi världens första slingförstärkare med true constant current under varumärket Univox®. Vårt mål är att med en hög servicegrad erbjuda våra kunder högkvalitativa hörselprodukter genom att ständigt söka nya vägar för att få fram förbättrade produkter ur både användar- och miljösynpunkt.

Bo Edin AB	Stockby Hantverksby 3, 181 75 Lidingö	Tel 08-767 18 18	E-post info@edin.se
Besök	Förrådsvägen 2 B, 181 41 Lidingö	Fax 08-767 18 20	Internet edin.se • univox.eu

Hearing excellence since 1965

